

GEBRAUCHSANWEISUNG

TURBOCLASS™ VIBRATIONSMASSEGERÄT

Spezifikationen:

- PROGRAMM: 6 Geschwindigkeitsstufen der Massage
- Ladespannung: 7,4 V/12 V 1 A
- Maximale Leistung: ≤ 20 W
- Gewicht: 1,3 kg
- Ladezeit: 3 Stunden bis zur vollständigen Akkuladung
- Nutzungsdauer: 90-150 Minuten
- Farbe: schwarz


Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x TurboClass™ Vibrationsmassagegerät
- 4 x Massagekopf
- 1 x Ladegerät
- 1 x Benutzerhandbuch



Gebrauchsanweisung:

1. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
2. Die Standardgeschwindigkeit (erste Stufe) ist sichtbar, wenn eine der sechs Lampen auf der Rückseite des Geräts leuchtet.
3. Um die Geschwindigkeit zu ändern, drücken Sie erneut die Ein-/Ausschalttaste. Die Anzahl der eingeschalteten Lichter zeigt Ihre Geschwindigkeit an. Wenn 3 Lichter leuchten, bedeutet dies, dass Sie die dritte Geschwindigkeit gewählt haben. Sie können zwischen 6 Geschwindigkeitsstufen wählen.
4. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt.
5. Laden Sie das Gerät auf, indem Sie das Ladegerät an die Ladeschnittstelle anschließen, wie in der Abbildung unten dargestellt. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Kontrollleuchte auf, wenn das Gerät aufgeladen ist, leuchtet die gelbe Kontrollleuchte auf.

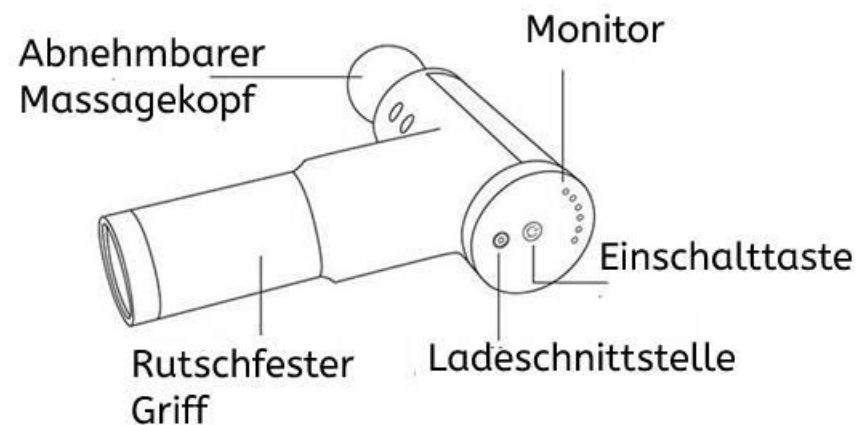

4 KÖPFE zur Massage des gesamten Körpers:

- **Der runde Kopf** ist für die Massage großer Muskelgruppen vorgesehen: Rücken- und Gesäßmuskulatur, hintere Oberschenkelmuskeln und Oberschenkel, Schultergürtel.

RUNDER KOPF



- **Der flache Kopf** ist für dieselben Muskelgruppen bestimmt wie der runde, nur dass er aufgrund seiner steiferen Struktur für Personen mit besserer körperlicher Verfassung geeignet ist, da die Stoßwellen aufgrund der Form und Stärke des Kopfes viel intensiver sind.

FLACHER KOPF



- **Der Doppelkopf** ist für kleine und mittelgroße Muskelgruppen gedacht: Nackenbereich, Achillessehne, Knöchel, Wadenmuskeln, Schulterbereich.

DOPPELKOPF



- **Der Spitzkopf** ist für eine intensive Tiefenmassage konzipiert, da der Fokus der Stoßwellen auf einen kleinen Bereich konzentriert ist.

SPITZKOPF

