

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VIBRÁCIÓS MASSZÁZSGÉP

Termékleírás:

- PROGRAM: 6 masszázss sebességfokozat
- Töltőfeszültség: 7,4 V / 12 V 1 A
- Maximális teljesítmény: ≤ 20 W
- Súly: 1,3 kg
- Töltési idő: 3 óra a készülék teljes feltöltésig
- Használati idő: 90-150 perc
- Szín: fekete


A csomag tartalma:

- 1 db vibrációs masszázskészülék
- 4 db masszázsfaj
- 1 db töltő
- 1 db használati utasítás



Használati utasítás:

1. Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig az eszköz bekapcsolásához.
2. Az alapértelmezett sebesség (első fokozat) látható, amikor az eszköz hátulján elhelyezkedő hat lámpa egyike világít.
3. A sebesség változtatásához nyomja meg ismét a be-/kikapcsoló gombot. A világító lámpák száma mutatja az Ön sebességfokozatát. Ha 3 lámpa világít, az azt jelenti, hogy a harmadik sebességet választotta ki. 6 sebességfokozat közül választhat.
4. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, és tartsa azt 3 másodpercig lenyomva.
5. Az eszköz töltéséhez csatlakoztassa a töltőt a töltőcsatlakozóhoz, ahogyan az alábbi kép mutatja. Töltés közben a jelzőfény vörösén világít, majd amikor az eszköz feltöltött, a sárga lámpa villan fel.

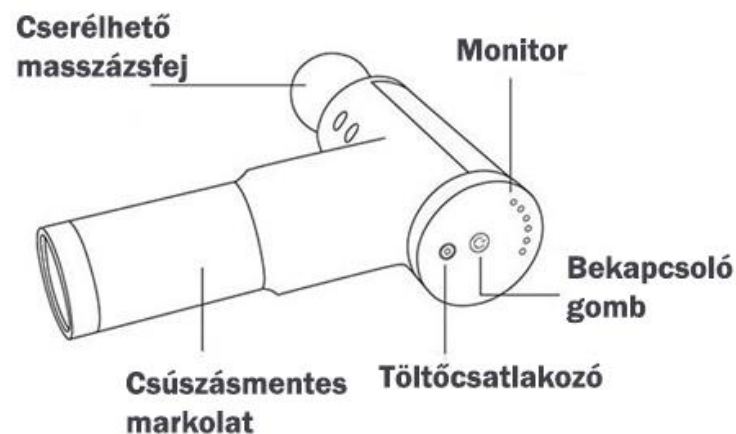

- 4 FEJJEL a teljes test masszírozásához:
A gömbölyű fej a nagyobb izomcsoportok masszírozására alkalmas: hát- és fenékizmok, combizmok és combok, vállöv.

GÖMBÖLYŰ FEJ



- **A lapos fejet** ugyanazon izomcsoportokra szánták, mint a gömbölyűt, azzal a különbséggel, hogy merevebb struktúrája miatt erősebb fizikai felépítésű emberek számára alkalmas, mivel a lökéshullámok a fej formája és ereje miatt sokkal intenzívebbek.

LAPOS FEJ



- **A kettős fej** a kisebb és a közepes méretű izomcsoportokra való: nyak környéke, Achilles-ín, bokák, vádli, váll környéke.

DUPLA FEJ



- **A kúpos fejet** intenzív, mélyre ható masszázsról tervezték, mivel a lökéshullámok fókusza kis területen koncentrálódik.

KÚPOS FEJ

