

NAVODILA ZA UPORABO

VIBRACIJSKA MASAŽNA NAPRAVA

Lastnosti:

- PROGRAM: 6 hitrostnih stopenj masaže
- Polnilna napetost: 7,4 V/12 V 1 A
- Maksimalna moč: ≤ 20 W
- Teža: 1.3 kg
- Čas polnjenja: do napolnjenosti 3 ure
- Čas uporabe: 90-150 minut
- Barva: črna


Paket vsebuje:

- 1x Naprava za vibracijsko masažo
- 4x masažna glava
- 1x polnilnik
- 1x uporabniški priročnik



Navodila za uporabo:

1. Pritisnite gumb za prižig in držite 3 sekunde, da se naprava prižge.
2. Privzeta hitrost (prva stopnja) je vidna s prižgano eno od šestih lučk na zadnjem delu naprave.
3. Če želite spremeniti hitrost, ponovno pritisnite gumb za prižig. Kolikor lučk gori, takšno hitrost imate. Če gori 3 lučke, pomeni, da ste izbrali tretjo hitrost. Izbirate lahko med 6-imi stopnjami hitrosti.
4. Če želite napravo izklopiti, pritisnite gumb za izklop/prižig in ga držite 3 sekunde.
5. Napravo napolnite tako, da polnilec povežete s polnilnim vmesnikom kot je prikazano na spodnji sliki. Med polnjenjem indikator sveti rdeče, ko pa je naprava napolnjena, zasveti rumena lučka.

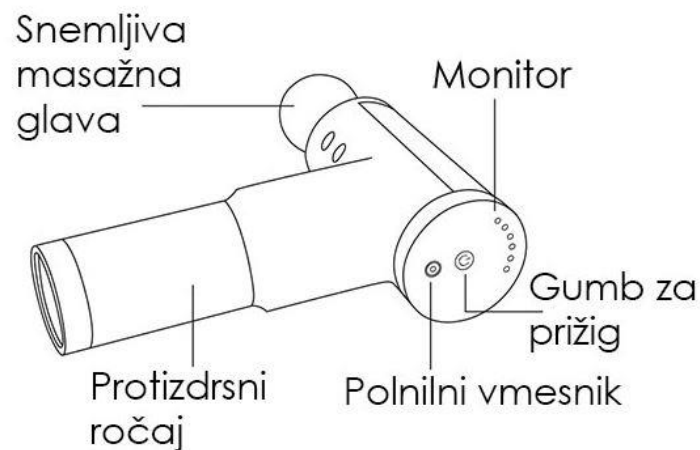

- **4 NASTAVKI** do masaže celotnega telesa:
Okroga glava je namenjena masaži večjih mišičnih skupin: hrbtne in zadnjične mišice, zadnja loža in stegna, ramenski obroč.

OKROGLA GLAVA



- **Ploščata glava** je namenjena istim mišičnim skupinam kot okrogla, le da je zaradi trše strukture primerna za osebe, ki so boljše telesno pripravljene, saj so udarni valovi zaradi oblike in trdnosti precej bolj intenzivni.

PLOŠČATA GLAVA



- **Dvojna glava** je namenjena manjšim in srednje velikim mišičnim skupinam: vratni predel, ahilova tetiva, gležnji, mečne mišice, ramenski predel.

DVOJNA GLAVA



- **Koničasta glava** je namenjena za intenzivno globinsko masažo, saj je fokus udarnih valov skoncentriran na malo površino.

KONIČASTA GLAVA

